


Bedienungsanleitung für **B+B Rollstühle**

Modelle: „Pyro“
„Pyro light“
„Pyro light XL“

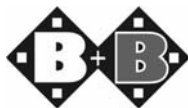



Lieber Benutzer,

mit dem Erwerb Ihres **Bischoff & Bischoff Faltrollstuhles** aus der **Pyro Serie** erhalten Sie ein deutsches Spitzenprodukt, das durch seine Variabilität neue Maßstäbe setzt.

Die Ihnen vorliegende Betriebsanleitung soll Ihnen dazu dienen, sich mit der Bedienung und Handhabung des Rollstuhles besser vertraut zu machen.

INHALTSVERZEICHNIS:


1.	Wichtige Sicherheitshinweise.....	3
2.	Indikationen.....	4
3.	Zweckbestimmung.....	4
4.	Konformitätserklärung.....	5
5.	Lieferumfang und Prüfung der Lieferung.....	5
6.	Übersicht des Rollstuhles.....	6
7.	Zusammenbau/Anpassungen.....	8
	7.1. Falten und Entfalten	
	7.2. Beinstützen	
	7.3. Seitenteil	
	7.4. Sitz/Sitzhöhereinstellungen	
	7.5. Bremse	
	7.6. Räder und Bereifung	
	7.7. Steckachsen	
8.	Optionen.....	14
	8.1. waagrechtverstellbare Beinstütze	
	8.2. Trommelbremse	
	8.3. höhenverstellbare Seitenteile	
	8.4. höhenverstellbare Schiebegriffe	
9.	Zubehör.....	16
	9.1. Kippschutz	
	9.2. Therapietisch	
	9.3. Sicherheitsgurt	
10.	Fahrbetrieb.....	17
11.	Technische Daten.....	18
12.	Transport.....	19
13.	Lagerung/Versand.....	19
14.	Reparatur.....	19
15.	Garantie-Urkunde.....	20
16.	Pflege, Hygiene und Wartungshinweise.....	21
17.	Entsorgung.....	21
	Anlage:	
	Hygiene + Risikobewertung.....	22
	Wartungsplan.....	23
	Tabelle „Sitzhöhenumbau“.....	24



1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um Stürze und gefährliche Situationen zu vermeiden, sollten Sie den Umgang mit Ihrem neuen Rollstuhl erst auf ebenem, überschaubarem Gelände üben. Eine Begleitperson ist in dem Fall empfohlen.

- Vor Anwendung des Rollstuhles kontrollieren Sie bitte, ob alle angebaute Teile ordentlich befestigt sind.
- Den Rollstuhl niemals an nicht fest montierten Teilen (den Armlehnen oder den Beinstützen) anheben.
- Dafür sorgen, dass Schraubachsen / Steckachsen richtig in den Achsaufnahmen sitzen, sonst besteht Verletzungsgefahr.
- Bitte beachten, dass sich bei Gleichgewichtverlagerungen (z.B. starke Oberkörperbewegungen oder Überwinden von Hindernissen), die Kippgefahr vergrößert. Die kritische Hindernishöhe beträgt 23 mm.
- Treppen und größere Hindernisse dürfen nur mit Hilfe von mindestens zwei Begleitpersonen überwunden werden. Verwenden Sie hierfür die Hebepunkte 1 und 2 (siehe Übersicht des Rollstuhles). Sind Einrichtungen wie Auffahrrampen, Aufzüge oder Treppensteighilfen vorhanden, sind diese zu benutzen.
- Bei Fahrten auf einem Gefälle muss beachtet werden, dass Kippgefahr schon bei 8% (5°) besteht. Die Verwendung eines Kippschutzes ist empfehlenswert.
- Vermeiden Sie ungebremstes Fahren gegen Hindernisse (Stufe, Bordsteinkante) oder „Herunterspringen“ von Absätzen.
- Vermeiden Sie Fahrten auf unebenem loseem Untergrund.
- Beim Überwinden von Hindernissen (Stufen etc.) ist eine Begleitperson hinzuzuziehen. Verwenden Sie die Ankipphilfe (siehe Rollstuhlüberblick) um den Rollstuhl entsprechend anzukippen.
- Beim Ein- oder Aussteigen in bzw. aus dem Rollstuhl sind beide Feststellbremsen anzuziehen.
- Achten Sie auf eine ausreichende Profiltiefe Ihrer Bereifung.
- Im Straßenverkehr ist die Straßenverkehrsordnung zu beachten.
- Die passive Beleuchtung (Reflektoren) Ihres Rollstuhls muss für anderen Verkehrsteilnehmer stets sichtbar sein.
- Die Feststellbremse darf nicht zum Abbremsen der Fahrt benutzt werden.
- Beim Abbremsen aus schneller Fahrt oder auf langem Gefällstrecken unter Verwendung der Greifreifen, erhitzen sich Finger und Handflächen. Achtung Verbrennungsgefahr!
- Wir empfehlen für Fahrten im Außenbereich Lederhandschuhe zu verwenden. Diese erhöhen die Griffbarkeit und schützen gleichzeitig Ihre Finger und Handflächen vor Schmutz und Verletzungen.
- Beim Transfer zwischen Rollstuhl und Bett bitte stets beachten:
 - ⇒ Beide Feststellbremsen anziehen.
 - ⇒ Seitenteil der Ein-/ Ausstiegsseite nach hinten abschwenken.
 - ⇒ Fußplatten (beim Ein-/ Aussteigen) hochklappen, nach innen/außen schwenken, ggf. abbauen.

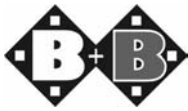

2. INDIKATIONEN:

Gehunfähigkeit bzw. stark ausgeprägte Gehbehinderung durch:

- Lähmungen
- Gliedmaßenverlust
- Gliedmaßendefekt/-deformation
- Gelenkkontrakturen/Gelenkschäden
- sonstige Erkrankungen

Eine Versorgung mit verstärkten Rollstühlen ist dann angezeigt, wenn das Körpergewicht des Behinderten 90 kg und mehr beträgt und ein Standard-Rollstuhl nicht mehr die notwendige Sicherheit gewährleistet.

3. ZWECKBESTIMMUNG:

Der Rollstuhl ist ausschließlich zur Mobilitätssteigerung und den Transport von gehbehinderten Menschen gemäß oben genannter Indikationen hergestellt.

Zu beachten:

Eine Gewährleistung kann von uns nur übernommen werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.

4. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

B+B erklärt als Hersteller des Produktes, dass die Rollstühle „Pyro“, „Pyro light“ und „Pyro light XL“ vollständig den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entsprechen.

5. LIEFERUMFANG UND PRÜFUNG DER LIEFERUNG:

Zum Lieferumfang im Spezialkarton gehören:

- 1 Rollstuhl, gefaltet
- 1 Luftpumpe (nur bei Luftbereifung)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Satz Werkzeuge (3 Innensechskantschlüssel SW3, SW4, SW6, 1 Kreuzschlitz- Schraubendreher, 1 Ringschlüssel SW10, SW13)

Alle **B+B** Rollstühle werden einer ordnungsgemäßen Endkontrolle in unserem Hause unterzogen und mit dem CE- Zeichen versehen.

Die **B+B** Rollstühle werden gefaltet in einem speziellen Karton geliefert. Anlieferung, Montage und Einweisung in den Gebrauch des Rollstuhles erfolgen über den qualifizierten Sanitätsfachhandel.

Bei Versand per Bahn oder Spedition ist die Ware im Beisein des Überbringers sofort auf Transportschäden zu kontrollieren.


Sollte ein Schaden vorliegen, so ist folgendes zu beachten:

- Aufnahme des Tatbestandes
- Erstellung einer Abtretungserklärung; alle Forderungen aus dem Schaden werden an den Überbringer abgetreten.
- Rücksendungen der Tatbestandsaufnahme, des Frachtbriefes sowie der Abtretungserklärung an die Firma **B+B**.



Im Falle eines Transportschadens...

- 1. Lassen Sie die Ware und Verpackung in jedem Fall unverändert, benutzen Sie die Ware noch nicht.*
- 2. Melden Sie den Schaden beim Transportunternehmen schriftlich wie unten aufgeführt.*
- 3. Setzen Sie sich anschließend mit unserem Kundenservice in Verbindung (0700 6000 70 70)*
- 4. Um Entschädigungsansprüche bei Transportversicherungen anmelden zu können, müssen Beauftragte der anliefernden Transportunternehmen rechtzeitig über einen Schaden informiert werden.*

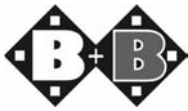

Äußerlich erkennbare Beschädigungen oder Verluste müssen vor Abnahme der Sendung durch den Anlieferer auf den Begleitpapieren bescheinigt werden.



Verdeckte Schäden, die erst beim Auspacken sichtbar werden, müssen sofort dem Transportunternehmen schriftlich gemeldet werden.

Bestimmte Fristen sind unbedingt einzuhalten:

- Paketdienste und Post innerhalb 24 Stunden
- Bahn innerhalb 7 Tagen
- Spediteure innerhalb 4 Tagen

nach Empfang der Sendung.

6. ÜBERSICHT DES ROLLSTUHLES

Um Ihnen die Handhabung Ihres **B+B** Rollstuhles so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die schriftlichen Ausführungen zusätzlich mit detaillierten Abbildungen dokumentiert.

Für Bezeichnung und Zusammenwirken der einzelnen Baugruppen soll Ihnen die folgenden Abbildungen als Hilfe dienen. (Abb. 1a und 1b)


Beachten Sie bitte die Textpassagen, die mit besonders gekennzeichnet sind.



- Rückenbespannung**
- Armlehnenpolster**
- Seitenteil**
- Sitzbespannung**
- Seitenteilverriegelung**
- Kniehebel-Feststellbremse**
- Typenschild***
- Hebepunkt 1**
- Kastorbuchse**
- Beinstütze**
- Lenkrad**
- Fußplatte**



Abb. 1a

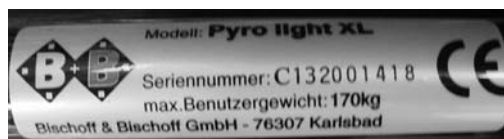

***) Typenschild**



Abb. 1b

- Handschiebegriffe**
- B+B Logo**
- Antriebsrad**
- Seitenteil/Armlehnencharnier**
- Reflektor nach hinten**
- Reflektor zur Seite**
- Hebepunkt 2**
- Ankipphilfe**
- Greifreifen**

7. ZUSAMMENBAU / ANPASSUNGEN

7.1. FALTEN UND ENTFALTEN

Anlieferung



Abb. 2

Ihr neuer B+B Rollstuhl wird komplett montiert und gefaltet in einem B+B Originalkarton angeliefert.

Um Beschädigungen beim Transport zu vermeiden, werden **steckbare Anbauteile** separat mitgeliefert. (Abb. 2)

Entfalten



Abb. 3

Positionieren Sie Ihren Faltrollstuhl neben sich. Kippen Sie ihn soweit zu sich, dass ein Antriebsrad entlastet ist (Abb. 3).

Drücken Sie nun **mit der flachen Hand** auf das Ihnen nähere Sitzrohr und entfalten somit den Rollstuhl (Abb. 4).



Beim Entfalten beachten Sie bitte, dass Ihre Finger auf dem Sitzgurt bleiben. Sonst Klemmgefahr !



Abb. 4

Falten

Positionieren Sie Ihren **B + B** Faltrollstuhl neben sich. Kippen Sie ihn an der Rückenlehne soweit zu sich, bis das gegenüberliegende Antriebsrad entlastet wird.

Gleichzeitig ziehen Sie die Sitzbespannung nach oben bis der Stuhl vollständig gefaltet ist (Abb. 5).



Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie den Rollstuhl beim Kippvorgang nicht an der Armlehne fest. Bei angebauter Beinstütze sind die Fußplatten zuvor hochzuklappen.



Abb. 5

7.2. BEINSTÜTZEN

Beinstützen mit Fußplatte

Die beiden Beinstützen werden mit den Fußplatten montiert angeliefert.

An beiden Beinstützen lassen sich die Fußplatten in Sitzposition nach oben klappen.

Beinstützen anbauen

- Halten Sie die Beinstütze am Oberteil, so dass diese nach außen zeigt. Betätigen Sie den Knopf der Steckachse und führen Sie nun die Beinstütze mit der Steckachse in die Lagerhülse ein, bis sie einrastet (Abb. 6).
- Jetzt wird die Beinstütze einfach nach vorne geklappt und dabei automatisch arretiert.

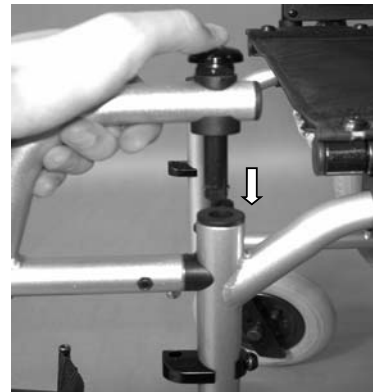


Abb. 6



Prüfen Sie vor Antritt der Fahrt den festen Sitz der Beinstützen !

Beinstützen abnehmen

Um Ihren Faltrollstuhl so kompakt wie möglich zu transportieren, können Sie die Beinstützen mit den Fußplatten komplett abnehmen (Abb. 7).

- Drücken Sie auf den Druckknopf, dadurch öffnen Sie die Verriegelung.
- Den Knopf gedrückt haltend ziehen Sie die Beinstütze nach oben heraus.



Abb. 7

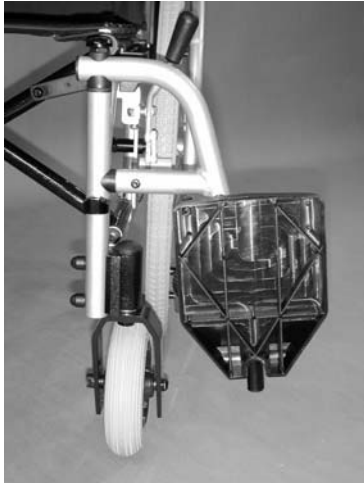


Abb. 8

Abschwenken der Beinstützen

Um Ihnen das Ein-/Aussteigen bei Ihrem **B+B** Faltrollstuhl so einfach wie möglich zu machen, können Sie die Beinstützen im Bedarfsfall einfach nach außen oder innen abschwenken, ohne sie dabei abbauen zu müssen (Abb. 8).

- Betätigen Sie den Druckknopf. Dadurch öffnet sich die Verriegelung.
- Dann ziehen Sie die Beinstütze leicht nach oben. Nun können Sie die Beinstütze nach außen bzw. nach innen abschwenken. Nachdem Sie die Beinstütze in die gewünschte Position gebracht haben, drücken Sie die Beinstütze wieder nach unten bis die Arretierung einrastet.
- Gegebenenfalls die Fußplatten zuvor hochklappen.

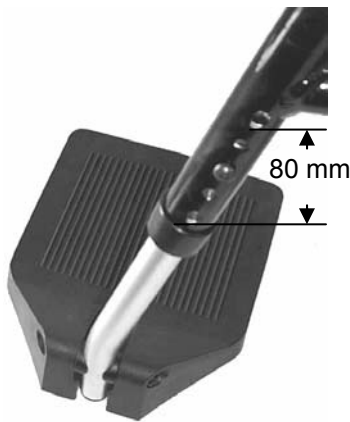


Abb. 9

Um den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen, einfach die Beinstütze nach vorne schwenken.



Beim Aufstehen aus dem Rollstuhl darf in keinem Fall auf die Fußplatten getreten werden!

Einstellen der Beinstützenlänge

Die Länge der Beinstütze kann standardmäßig um insgesamt 80 mm 4-fach in 20mm-Schritten verstellt werden.

Lösen sie hierzu die Inbusschraube (Innensechskant 4 mm) und stellen Sie die Beinstütze nach Ihrer Wahl ein (Abb. 9).

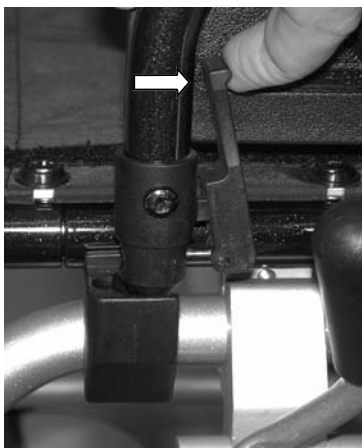


Abb. 10

7.3. SEITENTEIL

Seitenteil schwenken

Um leichter Ein-/Aussteigen zu können, sind die beiden Seitenteile mit den Armlehnen nach hinten schwenkbar.

Den Arretierhebel mit leichtem Fingerdruck betätigen (Abb. 10) und gleichzeitig das Seitenteil nach hinten schwenken (Abb. 11).



Abb. 11

Seitenteil verriegeln

Das Seitenteil nach vorne klappen und mit leichtem Druck auf die Armlehne einrasten lassen (Abb. 12)



Stellen Sie beim Schwenken der Seitenteile sicher, dass keine Kleidungsstücke oder sonstige Utensilien eingeklemmt werden können. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den festen Sitz der Seitenteile!

Zum Tragen des Rollstuhles nicht die Seitenteile benutzen!



Abb. 12

7.4. SITZ

Sitztiefeinstellungen

Bei Ihrem Rollstuhl können Sie die Sitztiefe variabel einstellen.

-
- Wenn Sie die Schrauben der Sitzbespannung mit einem Schraubenzieher lösen, können Sie das Sitzrohr 2 cm nach vorne bringen (Abb. 13).
- Nachdem Sie die gewünschte Sitztiefe eingestellt haben, ziehen Sie die Schrauben wieder fest (Abb. 14).



Achten Sie bitte immer darauf, dass die Schrauben fest angezogen sind!



Abb. 13

Sitzhöhereinstellungen

Siehe Tabelle „Sitzhöhenumbau“ auf Seite 24



Abb. 14

7.5. BREMSE

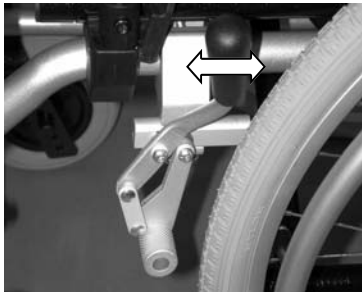


Abb. 15

Betätigung der Kniehebel- Feststellbremse (Kompaktbremse)

Zum Feststellen der Bremse einfach den Bremshebel nach vorne drücken bis er einrastet (Abb. 15).

Um die Feststellbremse wieder zu lösen, einfach den Bremshebel nach hinten ziehen (Abb. 15).

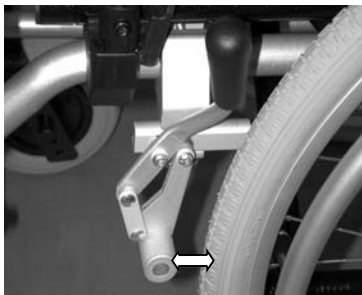


Abb. 16

Einstellen der Kniehebel-Feststellbremse (Kompaktbremse)

Sollten Sie bemerken, dass nur noch eine unzureichende oder ungleichmäßige Bremswirkung vorhanden ist, haben Sie wie folgt vorzugehen:

- Bei Luftbereifung zunächst den Reifendruck prüfen. Er muss 300 - 400 kPa (3-4 bar) betragen (bei pan-nensicherer Bereifung nicht erforderlich).
- Prüfen Sie die Reifenprofiltiefe. Achten Sie dabei auch darauf, ob gleichmäßiger Abrieb vorliegt. Ist die Profiltiefe in der Spurmitte <1mm, muss der Reifen vom Fachhandel gewechselt werden.
- Prüfen Sie nun die Einstellung der Bremse. Diese muss so eingestellt sein, dass der Abstand zwischen der Lauffläche des Rades und dem Bremsbolzen bei geöffneter Bremse 15 mm beträgt (Abb.16). Der Bremsbolzen muss waagrecht, also parallel zum Untergrund ausgerichtet sein.
- Nach dem Lösen der beiden Linsenkopfschrauben mit Innensechskant (5 mm) an der Bremsenhalterung (Abb. 17), können Sie die Bremse richtig positionieren.

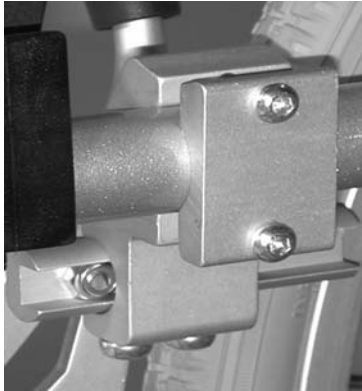


Abb. 17



Um eine optimale Funktionsfähigkeit der Bremse zu gewährleisten, muss bei Luftbereifung ein Reifendruck von 300 - 400 kPa (3-4 bar) vorherrschen! Bei nicht vorschriftsmäßigem Reifenluftdruck besteht ein Verlust der Bremswirkung!

Die Kompaktbremsen wirken jeweils nur auf ein Antriebsrad!

Achten Sie bei Luftbereifung immer auf den gleichen Luftdruck der Antriebsräder, um einen guten Geradeauslauf zu erreichen!

Nach Beendigung des Einstellvorganges, die gelösten Schrauben wieder fest anziehen und eine Bremsprobe durchführen!

Generell!!

Da die Bremse eine der wichtigsten Sicherheitseinrichtungen an Ihrem Rollstuhl darstellt, kann mit der optional erhältlichen Trommelbremse für die Begleitperson dem Wunsch nach einem Betriebs-Bremssystem entsprochen werden. Mit der Trommelbremse ist neben der Feststellung des Rollstuhls auch ein Abbremsen der Fahrt möglich!

Da bei der Trommelbremse die Bremsbacke nicht auf den Pneu, sondern auf die Bremstrommel in der Radnabe wirkt, ist dieses Bremssystem vom Reifenzustand (Luftdruck) weitgehend unabhängig, und somit wesentlich sicherer.

(Trommelbremse: siehe Optionen)

7.6. RÄDER UND BEREIFUNG

Die Speichenräder sind mit einer Steckachse (Ø12) an der Adapterplatte mit dem Fahrgestell (Abb. 18-19) angebracht. Das Modell Pyro light verfügt serienmäßig über Steckachsen. (Steckachsen siehe Kapitel 7.7)



Abb. 18



Nach jeder Montage ist der feste Sitz der Räder zu prüfen!

Antriebsräder

Auf Ihren Pyro werden serienmäßig Gummireifen mit Schlauch oder PU-Bereifung (pannensicher, ohne Ventil) der Größe 24"x1 3/8" montiert. Bei Verschleiß oder Defekt ist der autorisierte Fachhandel mit der Instandsetzung zu beauftragen.



Abb. 19



Um eine optimale Betriebssicherheit der Bremsen bzw. des Rollstuhles zu gewährleisten, muss bei Luftbereifung ein Reifenluftdruck von 3-4 bar vorherrschen.

Schwenkräder

Auf Ihren Pyro werden serienmäßig Gummireifen mit Schlauch oder pannensichere (ohne Ventil) Reifen mit einem Durchmesser von 7" montiert (Abb. 20).

Bei Verschleiß oder Defekt ist der autorisierte Fachhandel mit der Instandsetzung zu beauftragen.

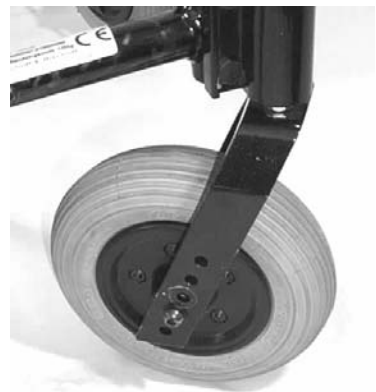


Abb. 20



Um eine optimale Betriebssicherheit des Rollstuhles zu gewährleisten, muss bei den luftbereiften Schwenkrädern ein Reifendruck von 200 - 250 kPa (2-2,5 bar) vorherrschen.

7.7. STECKACHSEN

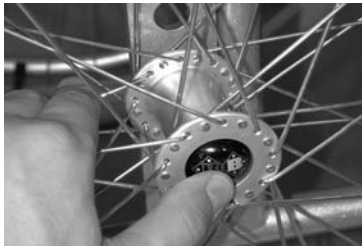


Abb. 21

Um eine wesentliche Erleichterung für den Transport Ihres Rollstuhles zu erreichen, besteht die Option, die Räder mit Steckachsen auszustatten.

Bei der Version mit Steckachse sind die Räder ohne Werkzeug abnehmbar. Das Prinzip ist denkbar einfach:

- Mit dem Finger auf den Arretierknopf der Steckachse drücken und das Rad abziehen (Abb. 21).
- Beim wieder Anbringen ist das Rad einfach wieder auf die Aufnahme zu stecken. Dabei ist ebenfalls der Arretierknopf hinein zu drücken.



Achten Sie beim Aufstecken darauf, dass die Steckachse bis zum Anschlag eingeführt ist!

Prüfen Sie nach dem Aufstecken den sicheren Sitz des Rades indem Sie das Rad zu sich herziehen, ohne dabei den Arretierknopf der Steckachse zu betätigen!

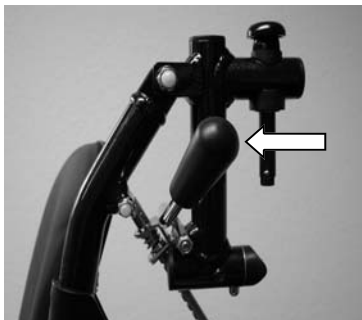


Abb. 22

8. OPTIONEN

8.1. WAAGERECHTVERSTELLBARE BEINSTÜTZEN

Montage, Demontage, Abschwanken und Einstellung der Beinstützen und der Beinstützenlänge entnehmen Sie bitte dem Kapitel 7.2

Die waagerechte Verstellung funktioniert wie folgt (siehe Abb.22):

- Hebel nach vorne drücken
- Durch Heben oder Senken des Fußplattenträgerrohres die Beinstütze in die gewünschte Position bringen
- Hebel loslassen. Beinstütze arretiert selbsttätig.



Achten Sie darauf, dass beide Beinstützen gleich hoch eingestellt und die Einstellschrauben festgezogen sind!

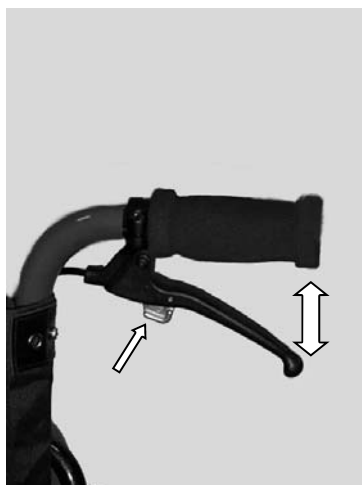


Abb. 23

8.2. TROMMELBREMSE

Betätigung der Trommelbremse für den Begleiter

Zum dosierten Abbremsen der Fahrt ziehen Sie einfach die Bremshebel rechts und links gleichmäßig nach Bedarf an. Zur Feststellung der Bremse wird bei angezogenem Bremshebel der Arretierhebel nach vorn gedrückt (Abb. 23).

Um die Feststellbremse wieder zu lösen, einfach die Bremshebel kurz anziehen. Die Arretierung löst sich selbsttätig (Abb. 23).

Einstellen der Trommelbremse



Die Grundeinstellung der Trommelbremse wird an der Seilklemmschraube vorgenommen (Abb. 24). Bei vollständig eingedrehter Feineinstellschraube (Abb. 25b) lösen Sie die Klemmschraube (Abb. 24) leicht und ziehen den Bremszug mit einer kleinen Zange soweit nach unten durch, bis der Bremszug gestrafft ist. Anschließend wird die Klemmschraube wieder gut festgezogen.



Die Feineinstellung wird über die Stelleinrichtung am Bremsseil vorgenommen. Wird die Stellschraube nach links gedreht (Schraube dreht nach oben aus der Mutter heraus), verstärkt sich die Bremswirkung (Abb. 25a). Wird die Stellschraube nach rechts gedreht (Schraube dreht nach unten in die Mutter hinein), vermindert sich die Bremswirkung (Abb. 25b).

Die Bremse ist dann optimal eingestellt, wenn bei angehobenen Rollstuhl, gelöster Bremse und Drehen des Rades ein nur sehr geringes Schleifgeräusch zu hören ist. Sollte kein Schleifgeräusch zu hören sein, muss gemäß Abb. 25a der Bremszug gestrafft werden, wenn ein zu starkes Schleifgeräusch oder gar ein Bremsen zu beobachten ist, muss der Bremszug gemäß Abb. 25b gelockert werden.



Die Trommelbremsen wirken jeweils nur auf ein Antriebsrad! Also stets beide Seiten prüfen und gleichmäßig einstellen.

Achten Sie immer auf gleichen Luftdruck beider Antriebsräder, um einen guten Geradeauslauf und gute Brems- und Fahreigenschaften zu gewährleisten!



Auch Trommelbremsen unterliegen einem Verschleiß. Bei nachlassender Bremswirkung darf der Rollstuhl nicht mehr betrieben werden. Um dies zu vermeiden, sollten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit sich vor jeder Fahrt von der Bremswirkung selber überzeugen und die Bremsanlage mindestens alle 6 Monate von Ihrem autorisierten Fachhändler überprüfen lassen.

Nach Beendigung des Einstellvorganges alle Schrauben fest anziehen und eine Bremsprobe durchführen!



Generell !

Einstellungen am Bremssystem sollten nur vom autorisierten Fachhändler durchgeführt werden!

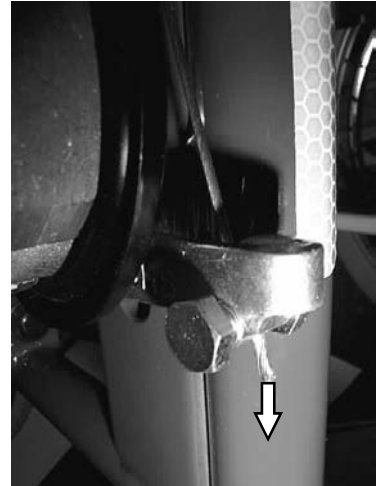


Abb. 24



Abb. 25a



Abb. 25b

8.3. HÖHENVERSTELLBARE SEITENTEILE



Abb. 26

Optional kann Ihr **Pyro mit höhenverstellbaren** Seitenteilen ausgestattet werden (nur Lang- Version). Die höhenverstellbaren Seitenteile sind abschwenkbar und durch eine Schraube (Innensechskant 6 mm) gegen Herausrutschen gesichert. Das Seitenteil ist abnehmbar und abschwenkbar.

Höhenverstellung:

- Betätigen Sie den Arretierhebel um die Armlehne in die gewünschte Position zu verstellen (75 mm 3 Stufen à 25 mm, Abb. 27).
- Wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben lassen Sie den Hebel los. Die Arretierung rastet dann ein.
- Die Höhe ist dann richtig gewählt, wenn bei Aufliegendem Unterarm, Ober- und Unterarm in etwa einen rechten Winkel bilden.

75mm
3 Stufen
à 25 mm

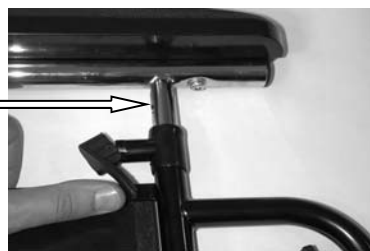


Abb. 27

8.4. HÖHENVERSTELLBARE SCHIEBEGRIFFE

Die Montageanleitung der höhenverstellbaren Schiebegriffe wird bei der Bestellung separat mitgeliefert.

9. ZUBEHÖR

9.1. KIPPSCHUTZ/KIPPSCHUTZROLLEN

Um den Kippschutz zu montieren gehen Sie bitte wie folgt vor.

- Gummiprofile der Ankipphilfe abziehen
- Rundprofil des Kippschutzes auf das Seitenrahmenrohr unten aufschieben
- Kippschutz mit der Schraube M6x35 und der selbstsichernde Mutter M6 in vorgesehener Bohrung am Rahmen befestigen.

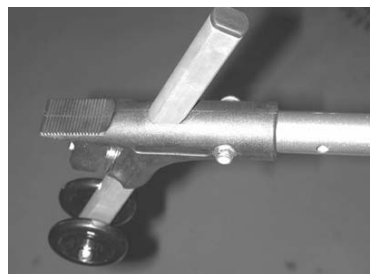


Abb. 28

9.2. THERAPIETISCH

Bei Seitenteilen mit langen Armpolster wird der Tisch mit vorgesehenen Führungen einfach von vorn auf die Armlehnen aufgeschoben (Abb. 29). Zum Entfernen des Therapietisches ziehen Sie diesen einfach wieder heraus.

Bei „desk“-Seitenteilen mit Armpolster wird der Tisch mit beigelegten Führungen aufgesetzt und mit Sterngriffschrauben befestigt (Abb. 29). Zum Entfernen des Therapietisches lösen Sie zunächst die Sternschrauben und ziehen den Tisch dann wieder heraus.



Abb. 29

9.3. SICHERHEITSGURT

Bei Bedarf ist ein Sicherheitsgurt als Zubehör verfügbar. Dieser wird bei vorübergehend entferntem oder abgeschwenktem Seitenteil am Seitenrahmen des Rollstuhls montiert (Abb. 30).

Schlagen Sie das offene Ende des Gurtes einmal um das Seitenrahmenrohr und fixieren Sie es anschließend mit der Gurtschnalle.

Die Gurtlängen Anpassung erfolgt ebenfalls über die Gurtschnalle. Stellen Sie die Gurtlänge so ein, dass der Gurt straff sitzt jedoch nicht drückt.



Abb. 30

10. FAHRBETRIEB

Setzen Sie sich in Ihren **B+B** Rollstuhl. Achten Sie bitte darauf, dass Sie so weit wie möglich hinten sitzen.

Die Fortbewegung erfolgt über die Greifreifen an den Antriebsrädern. Führen Sie die ersten Fahrversuche vorsichtig durch, bis Sie sich an den Rollstuhl und sein Fahrverhalten gewöhnt haben.

Rollstühle haben nur eine eingeschränkte Kipp- und Rutschsicherheit. Besondere Vorsicht ist geboten beim Bremsen, Anfahren oder Wenden an Steigungen bzw. Gefällen. Extremes Herauslehnen aus dem Rollstuhl vergrößert zudem die Kippgefahr. Zur größeren Sicherheit lassen sich alle Rollstühle mit einem Sicherheitsgurt ausrüsten (nicht serienmäßig).

Um Hindernisse leichter überwinden zu können, besteht für das Begleitpersonal die Möglichkeit, durch Fußdruck auf die Ankipphilfe den Rollstuhl winkelgerecht zum Hindernis anzustellen (Abb. 31).

Vor dem Ein-/Aussteigen ist die Feststellbremse zu betätigen. Fahrten außerhalb der Wohnung sollten nur mit ausreichender Fahrpraxis durchgeführt werden. Falls möglich sollte Sie eine Person begleiten.




Die statische Stabilität beträgt beim Grundmodell 5° (ca. 8%).

Die kritische Hindernishöhe* beträgt beim Grundmodell in ungünstiger Situation (max. Schwerpunktverlagerung nach hinten) 23 mm.

** Die kritische Hindernishöhe ist die Höhe, bei der der Schwerpunkt (mit Benutzer) gerade senkrecht über der Hinderniskante steht. Versucht der Benutzer ohne Verlagerung des Schwerpunktes nun nach vorne, den Rollstuhl durch Antreiben der Antriebsräder auf das Hindernis zu bringen, so kippt der Rollstuhl nach hinten um.*



Abb. 31

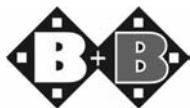

Laut STVZO 66/1 vom 01.01.1981 benötigen handbetriebene Rollstühle, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen (auch auf Bürgersteigen), eine fest angebrachte Beleuchtung.

Diese besteht aus (passiv):

- zwei roten Reflektoren nach hinten
- zwei gelben Reflektoren seitlich

(jeweils auf beiden Seiten).

Wird der Rollstuhl nach Einbruch der Dunkelheit benutzt, sind zusätzlich erforderlich (aktiv):

- eine weiße Leuchte nach vorne
- eine rote Leuchte nach hinten.


Das Funktionieren dieser Leuchten muss durch einen fahrbetrieb-sunabhängigen Stromkreis (Batterien) gewährleistet sein.

11. TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite:	38, 41, 43, 45, 48 cm* 51, 56 cm****
Integrierte Adapterplatte für Sitzhöhenverstellung	
Sitzhöhe:	42-54 cm
Sitztiefe	42-44 cm*, 44-46 cm****
Rückenhöhe:	40 cm***, 42 cm****
Fahrgestell:	Stahl
Anbauteile:	Stahl** oder Aluminium***, **** kunststoffbeschichtet
Faltmechanismus:	einfache Kreuzstrebe* doppelte Kreuzstrebe****
Antriebsräder (Standard):	luftbefüllt oder pannensichere PU-Bereifung 24" x 1 ³ / ₈ " auf Aluminiumfelge (weitere Größen sind erhältlich)
Lenkräder (Standard):	wahlweise mit Luft-, Voll- oder Softgummbereifung 7" x 1 ³ / ₄ " (weitere Größen sind erhältlich)
Seitenteile:	desk oder lang, einfach schwenkbar (optional höhenverstellbar)
Beinstützen:	abnehm-/abschwenkbar; die Unterschenkellänge ist einstellbar (optional waagrecht verstellbar)
Sitz- und Rückenbezüge:	hochwertiges, abwaschbares, atmungsaktives und pflegeleichtes Vinyl
Bremsen:	Kniehebel-Reifenbremse (Kompaktbremse) (optional Trommelbremse und Brems-einrichtung für Begleitperson)
Achsen Antriebsräder:	Schraubachse Ø12mm** (optional Steckachse)** Steckachse serienmäßig***, ****
Farben:	weinrot, blau** silbermetallic, blaumetallic*** silbermetallic****

Standardausstattung für:

- * „Pyro“ und „Pyro light“
- ** „Pyro“
- *** „Pyro light“
- **** „Pyro light XL“

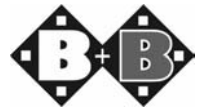

Gewicht:	„Pyro“	18,9 kg
	„Pyro light“	16,2 kg
	„Pyro light XL“	18,0 kg
Max. Belastbarkeit:		
	„Pyro“	120 kg
	„Pyro light“	120 kg
	„Pyro light XL“	170 kg

12. TRANSPORT


Um den Rollstuhl für Transport so handlich wie möglich zu machen, müssen alle abnehmbare Teile (Beinstütze, Antriebsräder, einsteckbare Zubehörteile) entfernt und der Rollstuhl gefaltet werden.

13. LAGERUNG / VERSAND

Falls der Rollstuhl eingelagert oder versendet werden soll, müssen alle einsteckbare und nicht befestigte Teile, außer Antriebsräder, entfernt und in passenden Kartons einzeln verpackt werden. Die einzeln verpackten Teile können dann zusammen in einem größeren Karton verpackt werden. Empfehlenswert ist es die Originalverpackung aufzubewahren und für diese Zwecke einzulagern, so dass sie im Bedarfsfall verfügbar ist. Dann ist Ihr Rollstuhl optimal geschützt gegen Umwelteinflüsse während der Lagerung oder des Transportes.

14. REPARATUR

Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von autorisierten Partnern (Sanitätshäuser oder Fachhändler) durchgeführt werden. Einen Partner in Ihrer Nähe erfragen Sie bitte telefonisch bei unserem Kundenservice
Tel.: 0700 6000 70 70.

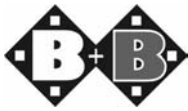

15. GARANTIE-URKUNDE

Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mängel des Rollstuhles die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Bei Beanstandungen ist die vollständig ausgefüllte Garantieurkunde mit einzureichen.

Für unseren Faltrollstuhl aus der Serie „Pyro“ übernehmen wir eine Garantie von 5 Jahren auf den Rahmen und die Schere. Auf alle anderen Anbauteile übernehmen wir eine Garantie von 2 Jahren.

Achtung!



*Nichtbeachtung der Betriebsanleitung sowie unsachgemäß durchgeführte Wartungsarbeiten als auch insbesondere technische Änderungen und Ergänzungen (Anbauten) ohne Zustimmung der Firma **Bischoff & Bischoff** führen zum Erlöschen sowohl der Garantie als auch der Produkthaftung allgemein.*

Für Fragen steht Ihnen der B+B Kundenservice unter der Rufnummer 0700 - 6000 7070 zur Verfügung.

Garantie – Urkunde


Fahrzeug: Modellbezeichnung:
Modellnummer:

Seriennummer:*
(vom Fachhandel einzutragen)

Fachhändler:

Datum und Stempel

* Hinweisschilder befinden sich auf dem Seitenrahmen

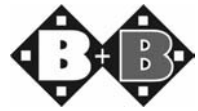

16. PFLEGE, HYGIENE UND WARTUNGSHINWEISE

Wie alle technischen Produkte sollten auch Krankenfahrzeuge sowie fahrbare Gehhilfen einer regelmäßigen Überprüfung bzw. Wartung durch autorisiertes Fachpersonal unterzogen werden. Diese Prüfungen sollten in erster Linie die Sicherheit des Benutzers sicher stellen. Darüber hinaus wird durch die regelmäßige Pflege des Produkts die einwandfreie Funktion auch nach längerer Benutzung gewährleistet.

Nachfolgend haben wir einige Pflegetipps, einen Hygieneplan sowie eine Wartungstabelle für Sie ausgearbeitet. Wir hoffen, Ihnen damit eine gute Übersicht über die wichtigsten Pflege-, Hygiene- und Wartungsarbeiten an Ihrem Bischoff + Bischoff Produkt zur Verfügung gestellt zu haben.

Pflegehinweise

Die Reinigung der **Sitz- und Rückenbezüge** kann mit warmem Wasser unter Zuhilfenahme eines Schwamms und/oder einer weichen Bürste vorgenommen werden. Bei hartnäckiger Verschmutzung kann dem Wasser ein handelsübliches mildes Waschmittel zugesetzt werden.


Hinweis: Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungsmittel wie z.B. Lösungs- / Scheuermittel, Sanitärreiniger oder harte Bürsten.

Kunststoffteile pflegen Sie am besten mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger. Beachten Sie bitte die Produktinformationen des Reinigungsmittels.


Durch die hochwertige Oberflächenbeschichtung wird ein optimaler Korrosionsschutz gewährleistet. Sollte die **Lackierung** durch Kratzer o. ä. beschädigt werden, können Sie die fehlerhafte Stelle mit einem Lackstift ausbessern. **Chromteile** werden zunächst trocken abgerieben. Matte Stellen sowie stark haftender Schmutz lassen sich am besten mit den entsprechenden handelsüblichen Pflegemitteln entfernen.

17. ENTSORGUNG

Auch ein ausgedienter Rollstuhl stellt eine wertvolle Materialquelle dar die dem industriellen Zyklus wieder zugeführt werden kann. Werfen Sie deshalb Ihren zu entsorgenden Rollstuhl nicht in den Hausmüll sondern lassen ihn durch eine staatlich zugelassene Entsorgungsstelle fachgerecht entsorgen. Ihre örtliche Müllabfuhr wird Ihnen gerne entsprechende Auskünfte geben. Die Umwelt dankt es Ihnen.

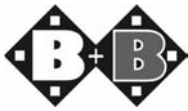


① Produkt/e	② Risiko- Einstufung	③ Hygiene- Häufigkeit	④ Art des Ver- fahrens	⑤ Vorbe- handlung des Produkts	⑥ Desinfektion	⑦ Spezielle Kenn- zeichnun- g	⑧ Sterili- sation	⑨ Kritische Verfahrens- schritte, Besondere Anforderungen
Rollstühle Jako* Pyro light* Pyro light XL* Pyro light Hemi* Pyro* S-Eco S-Top S-Top XL Triton Tweezer Rapid	Medizinprodukt, das lediglich mit intakter Haut in Berührung kommt Unkritisches Medizinprodukt	Spätestens nach jedem Benutzerwechsel	Wischdesinfektion Mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln (Meiaseptol o.ä.)	Nicht erforderlich	1. Vor der Aufbereitung des Produkts Schutzhandschuhe anziehen 2. Zu behandelnde Stellen mit Desinfektionsmittel einsprühen 3. Behandelte Stellen mit Papiertuch trocken reiben, ggf. wiederholen 4. Schutzhandschuhe und Papiertücher entsorgen	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Rollstühle *Austausch der Sitz- bzw. Rückenbespan- nung empfohlen
Gehhilfen Rollator B Delta B RL 120 Rezi Gebo VFG GS-L/R								Gehhilfen Keine
Pflegehilfsmittel TS-1 TS-200 TS-Care TSE-A TSE-O DH-40 BB-80 RMS-250 * / ** WMS-100 **								Pflegehilfsmittel *Chemothermische Aufbereitung der Mat- ratze erforderlich, **Der Bezug ist bis 40° C maschinen-waschbar

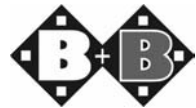

Wartungsarbeiten

Wann	Was	Zur Beachtung
<p>Vor jedem Fahrtantritt</p>	<p>Funktionsprüfung der Bremsanlage Bremsen bis zum Anschlag betätigen. Die gebremsten Räder dürfen sich bei normaler Benutzung nicht mehr drehen.</p> <p>Verschleißprüfung der Druckbremse Bremshebel seitlich bewegen.</p> <p>Überprüfung des Reifen- Luftdrucks Standard- Bereifung vorne: 200 - 250 kPa (2 - 2,5 bar) Standard- Bereifung hinten: 300 - 400 kPa (3 - 4 bar) Leichtlauf- Bereifung: 600 - 750 kPa (6 - 7,5 bar)</p> <p>Überprüfung des Reifenprofils</p>	<p>Durchführung der Prüfung durch den Benutzer oder eine Hilfsperson. Bei fehlerhafter Bremse die Instandsetzung durch eine autorisierte Fachwerkstatt veranlassen.</p> <p>Durchführung der Prüfung durch den Benutzer oder eine Hilfsperson. Bei zu großem Bremshebelspiel die Instandsetzung der Bremse durch eine autorisierte Fachwerkstatt veranlassen.</p> <p>Durchführung der Prüfung durch den Benutzer oder eine Hilfsperson. Hierzu Luftdruck- Prüfgerät benutzen. <i>Achtung !</i> Zu niedriger Reifendruck wirkt sich negativ auf das Bremsverhalten aus.</p> <p>Sichtprüfung durch den Benutzer. Bei abgefahrenem Reifenprofil oder einer Beschädigung des Reifens die Instandsetzung durch eine autorisierte Fachwerkstatt veranlassen.</p>
<p>Alle 4 Wochen (je nach Gebrauchshäufigkeit)</p>	<p>Ölen der beweglichen Bauteile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle Drehpunkte der Kreuzstrebe - Bewegliche Teile der Seitenteile - Bremshebellager - Beinstützenlager <p>Überprüfung der Schrauben auf ihren festen Sitz</p>	<p>Durchführung durch den Benutzer oder eine Hilfsperson. Vor dem ölen der Bauteile diese von Altölresten befreien. Überschüssiges Öl entfernen.</p> <p>Durchführung der Prüfung durch den Benutzer oder eine Hilfsperson.</p>
<p>Alle 6 Monate (je nach Gebrauchshäufigkeit)</p>	<p>Ü b e r p r ü f u n g e n</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sauberkeit - Allgemeiner Zustand 	<p>Beachten Sie die Pflege- und Hygienehinweise. Bei eventuellen Mängeln beauftragen Sie bitte nur autorisierte Fachwerkstätten mit den notwendigen Instandsetzungsarbeiten, denn nur diese sind in die Ausführung der erforderlichen Arbeiten eingewiesen und verfügen in der Regel über ausreichend geschultes Personal.</p>

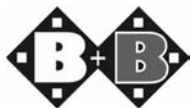

Anlage: Tabelle „Sitzhöhenumbau“

Modell	Sitz- höhe	Antriebsräder	Position Adapterplatte	Lenk- räder	Radgabel	Position Vorder- radgabel	Bemerkungen
Pyro	42cm	22"	2. Bohrung von oben	4"	schmal 2- Loch (gekürzt)	obere Bohrung	Keine Montage von Bein- stützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fuß- platte möglich
Pyro	44cm	22"	2. Bohrung von oben	4"	schmal 3- Loch	mittlere Bohrung	Keine Montage von Bein- stützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fuß- platte möglich
Pyro	45cm	24"	2. Bohrung von oben	4"	schmal 3- Loch	mittlere Bohrung	Keine Montage von Bein- stützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fuß- platte möglich
Pyro Hemi mit Radaus- leger	45cm	24"	2. Bohrung von oben	6" Luft	breit 5- Loch	2. Bohrung von oben	Keine Montage von Bein- stützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fuß- platte möglich
Pyro Hemi mit Radaus- leger	46cm	24"	2. Bohrung von oben	6" Luft	schmal 3- Loch	untere Bohrung	Keine Montage von Bein- stützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fuß- platte möglich
Pyro	46cm	24"	2. Bohrung von oben	5"	schmal 3- Loch	mittlere Bohrung	Keine Montage von Bein- stützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fuß- platte möglich
Pyro	47cm	24"	2. Bohrung von oben	5"	schmal 3- Loch	untere Bohrung	
Pyro	48cm	24"	2. Bohrung von oben	6"	schmal 3- Loch	untere Bohrung	
Pyro	52cm	24"	3. Bohrung von oben	7"	breit 5- Loch	4. Bohrung von oben	
Pyro	54cm	24"	untere Bohrung	7"	breit 5- Loch	untere Bohrung	

Bischoff & Bischoff

Medizin- und Rehabilitationstechnik GmbH

Industriestrasse 2 - 4
D - 76307 Karlsbad